



CENTRO DI ODONTOIATRIA OPERATIVA s.r.l.
Divisione Materiali: Via Guizza, 309 - 35125 Padova
Tel. 049.681123 - Fax 049.8806560 - P.IVA 01385450281
<http://www.odopguizza.it> - e-mail: info@odopguizza.it

SCHEDA TECNICA

Nome prodotto: **COLLAGENE AT® ESPANSO**

COMPONENTE DEL DISPOSITIVO MEDICO:
"SISTEMA DI MATERIALI PER RIGENERAZIONE GUIDATA
COLLAGENE AT® IDROSSILAPATITE AT®"



- Materiale** ➤ Collagene liofilizzato di origine equina.
- Struttura** ➤ Parallelepipedo con microirregolarità nanometrica di superficie per riempire rapidamente le grandi cavità ossee ed avere una funzione emostatica.
- Riassorbimento** ➤ In modo rapido.
- Sterilizzazione** ➤ A raggi gamma.
- Confezioni** ➤ 5 parallelepipedi 6x6x60 mm (cod. 4120) in flaconcini di vetro con chiusura a vite e tappo in bachelite.
- Indicazioni** ➤ Dopo le estrazioni o la rimozione di cisti dentarie viene utilizzato per riempire rapidamente le grandi cavità ossee residue.
➤ Per avere nelle cavità e negli alveoli una valida funzione emostatica.
➤ Per far aderire alla superficie esterna del Collagene AT Espanso l'Idrossilapatite e le Membrane di Collagene AT in modo da inserire le sostanze nelle cavità ossee e negli alveoli residui post-estrattivi ottenendo la Rigenerazione guidata del tessuto osseo.
- Avvertenza** ➤ Il Collagene AT® Espanso è monouso.
Viene fornito in flaconcini in vetro e sterilizzato a raggi gamma.
Aprire solo immediatamente prima dell'uso.
Conservare a temperatura ambiente.
Evitare l'esposizione a temperature superiori a 40°.
Utilizzare solo se la confezione è integra.
- Confezionamento** ➤ In scatole di cartone lucido.
- Principali utilizzazioni** ➤ Riempimento rapido delle grandi cavità ossee residue dopo le estrazioni e dopo la rimozione di cisti dentarie.
➤ Funzione emostatica sulle cavità ossee residue e sugli alveoli residui.
➤ Per l'applicazione rapida dei Materiali per la Rigenerazione guidata del tessuto osseo.

CENTRO DI ODONTOIATRIA OPERATIVA
Microfascia